


Pour plus de confort, Livia recommande de changer les Gel Pads à chacun de vos cycles menstruels

Voor uw comfort raadt Livia aan om de Gel Pads te vervangen na elke menstruatiecycclus.

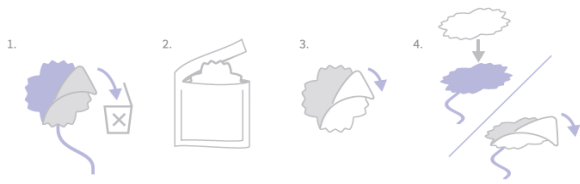

Pour remplacer les Gel Pads, suivez ces 4 étapes

Etape 1 : Enlever le Gel Pads usé de vos électrodes Livia

Etape 2 : Ouvrez l'emballage d'une paire de Gel Pads

Etape 3 : Retirez la protection du côté de l'opercule blanche

Etape 4 : Alignez le Gel Pads sur l'électrode et retirez l'opercule blanche

Stap 1 - Verwijder de gebruikte Gel Pads van de Livia elektroden.

Stap 2 - Open de verpakking van een paar Gel Pads

Stap 3 - Verwijder de bescherming aan de kant van de witte operculum

Stap 4 - Plaats de Gel Pads op de elektrode en verwijder de witte operculum.



LifeCare Ltd.  
Zipori St.2, 142460,  
Tiberias, Israel

Importateur et distributeur en France, Belgique, Hollande, Luxembourg :

Invoerder en verdeler in Frankrijk, België, Nederland, Luxemburg :

Importer and distributor in France, Belgium, Netherlands, Luxembourg :

Distec International sa/nv - Les Portes de l'Europe - Rue Maurice Faure 1,  
1401 Nivelles, Belgique/België/Belgium - www.distec.be

Le bouton stop pour vos douleurs menstruelles



# Livia

## Gel Pads

Ce paquet contient :  
6 paires de Gel Pads Livia

—  
Dit pakket bevat  
6 paar Livia Gel Pads



Rechargeable lithium battery, 3.7VDC 380mAh

De stopknop voor uw pijnlijke menstruaties