



Manuel d'utilisation
Appareil de massage oculaire avec fonction
chauffante et lecture audio - Modèle Serenity
Référence : SNT212



**IMPORTANT: Merci de prendre connaissance de ce manuel avant
toute utilisation.**

CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables. - Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité.
- N'ouvrez jamais l'appareil vous-même, hormis pour remplacer la pile. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Pour usage externe uniquement.
- N'utilisez jamais cet appareil à proximité du cœur, autour de la bouche ou sur une peau malade.
- N'utilisez pas cet appareil dans des pièces très humides (une salle de bains par exemple).
- Si vous suivez un traitement médical, demandez conseil à votre médecin avant de commencer l'utilisation.

- N'utilisez pas l'appareil en dormant, en conduisant ou en prenant un bain.
- Veillez à ce que l'appareil n'entre pas en contact avec des éléments en métal comme une boucle de ceinture ou des bijoux.
- Veillez à ce que l'appareil n'entre pas en contact avec des éléments en métal comme une boucle de ceinture ou des bijoux.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Principe :

L'appareil de massage oculaire adopte le chauffage au fibre de carbone et la technologie de contrôle par puce micro-ordinateur pour aider la circulation sanguine de l'œil en appliquant le chauffage, les vibrations et la pression d'air à l'œil, en exerçant la capacité de régulation des muscles oculaires, en communiquant la vitalité à la peau de l'œil, en libérant la pression visuelle et en prenant soin de la vue. Musique intégrée avec massage pour aider à se détendre.

Convient aux personnes suivantes :

- Les étudiants soumis quotidiennement aux troubles de la vision liés à l'étude sur des livres ou des tableaux.
- Les travailleurs de bureaux qui regardent ordinateurs et téléphones.
- Les personnes qui ont des horaires de travail irréguliers, qui ont des habitudes nocturnes, qui ont des cernes.

Effets :



Relaxation oculaire :

Action intelligente sur les points oculaires, relaxation des nerfs oculaire.

Ne vous inquiétez plus pour votre fatigue oculaire.



Apporte plus de vitalité à l'espace oculaire :

Thérapie par micro-aimants. L'énergie magnétique agit sur les yeux pour leur donner plus de vitalité et rendre la peau plus élastique.



Aide à la circulation sanguine :

Le design pliable à 180 degrés correspond parfaitement au visage.

Compresse chaude d'une température de 42 degrés.



Soin de la vue :



Massage par vibrations multifréquences, travail l'ajustement des muscles oculaires.




Améliore la qualité du sommeil :

Une musique apaisante aide à diminuer le stress, apaise le corps et l'esprit.

Apparence du produit :

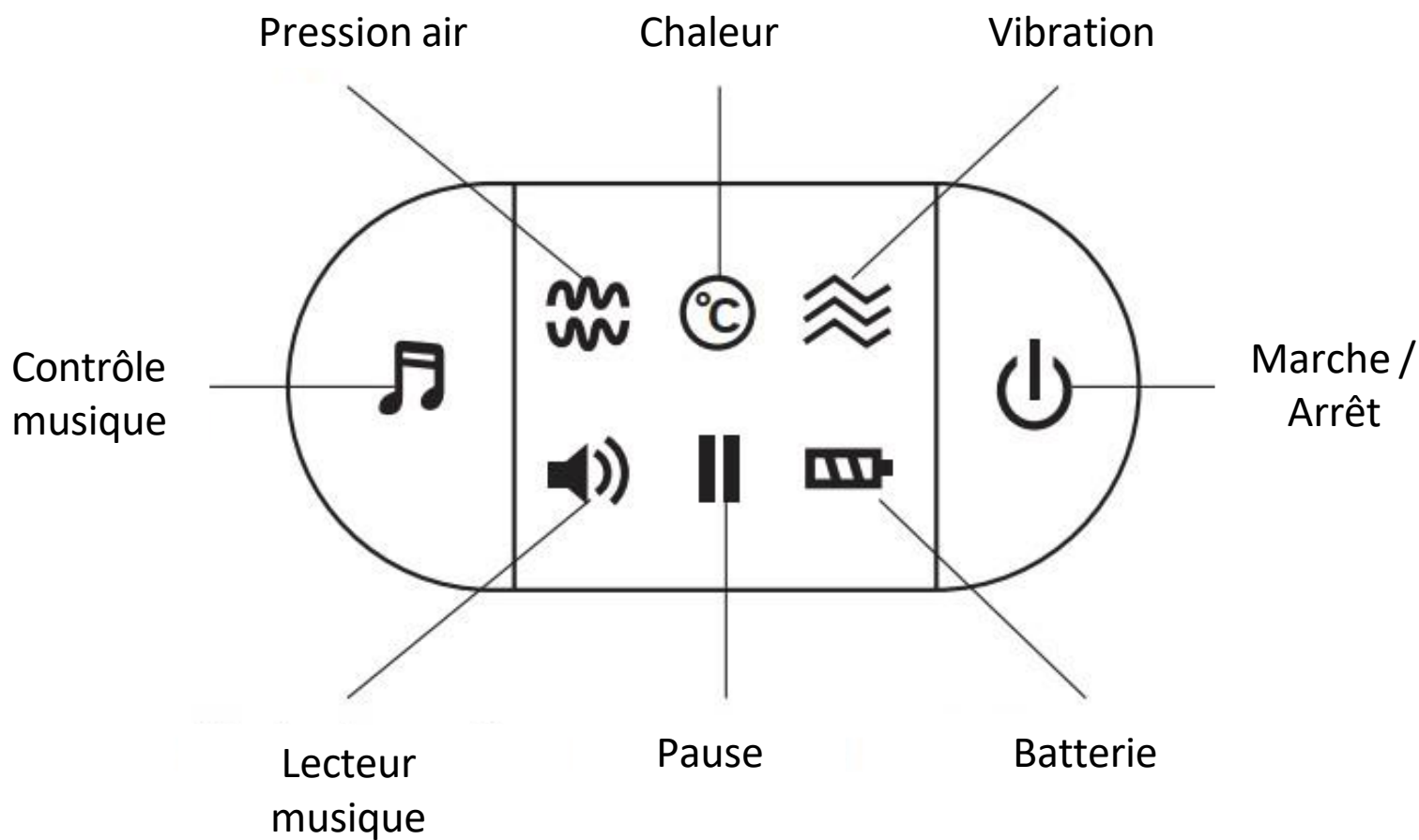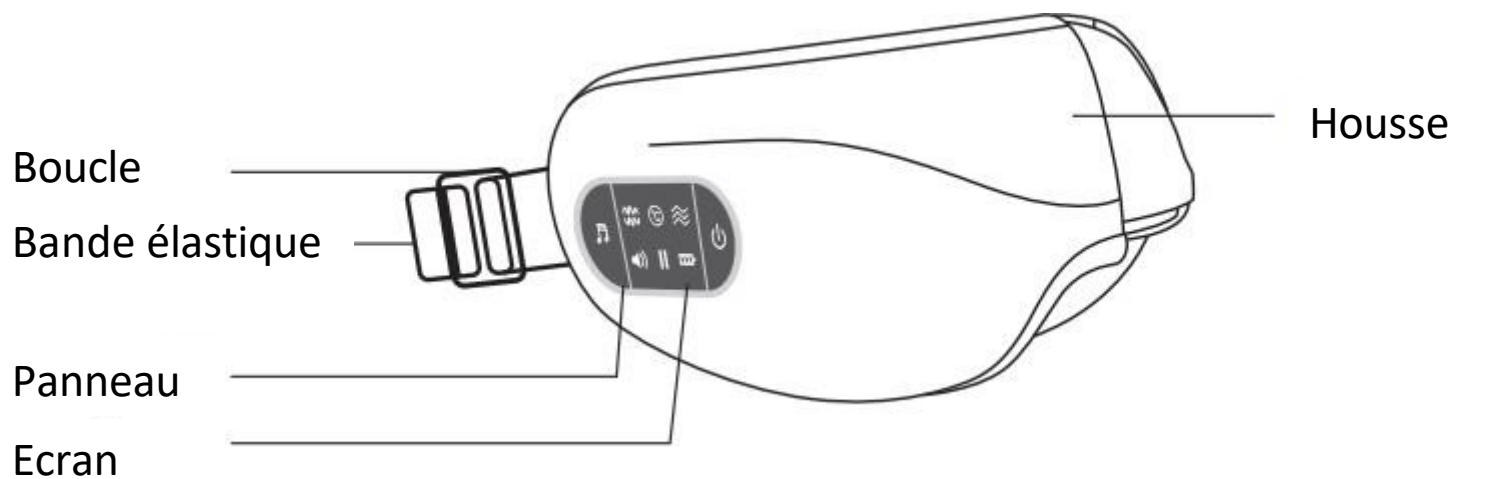


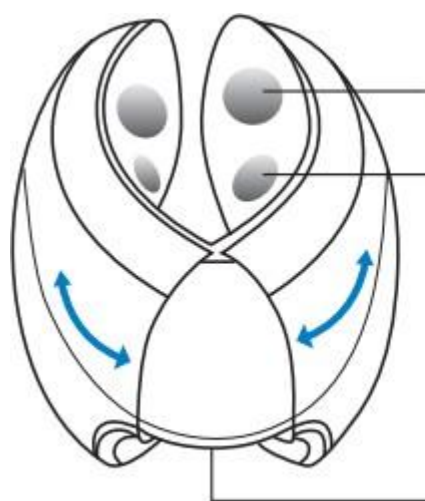

Haut parleur

Pression
d'air

Interface de charge

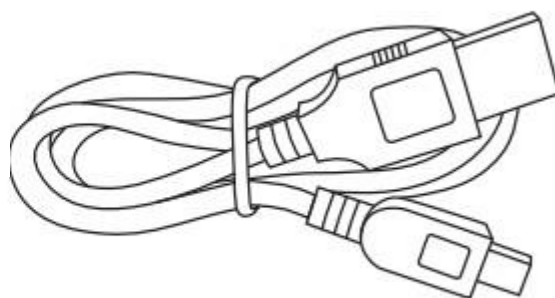

Câble USB

Méthode d'utilisation :

1. Réglez la boucle élastique dans une position confortable, et l'appareil est conçu pour les deux yeux.
2. Appuyez et maintenez le bouton Marche / Arrêt pendant 2 secondes, la machine s'allumera en mode automatique et fonctionnera pendant 15 minutes.
3. Chaque pression sur le bouton Marche / Arrêt change le mode. Il y a 3 modes de pression d'air, de chaleur et de vibrations.
4. Appuyez et maintenez le bouton Musique pendant 2 secondes pour contrôler, mettre en pause ou allumer la musique.
5. Lorsque la puissance du massage diminue, rechargez l'appareil.
6. Appuyez et maintenez le bouton Marche / Arrêt pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil.
7. Branchez l'appareil éteint à l'ordinateur pour gérer les morceaux de musique.
8. Utilisation recommandée en position allongé sur le dos.
9. Nettoyer le produit avec un chiffon sec lorsqu'il est sale.

Astuces:

Veillez utiliser le chargeur intégré pour la charge, le temps de charge est de 3 heures, le produit ne supporte pas le travail sous l'état de charge. Ne pas utiliser pendant une longue période, veuillez charger régulièrement (recommandé de charger une fois par mois) pour prolonger la durée de vie de la batterie. Si des douleurs apparaissent pendant l'utilisation, la durée d'utilisation est peut-être trop longue. Il est recommandé d'arrêter de l'utiliser. S'il ne convient pas, veuillez vérifier si la sangle est trop serrée ou si la position du masseur n'est pas réglée correctement.

Spécifications :

Nom	Eye Massager
Tension nominale	5 V
Puissance nominale	5 W
Alimentation	USB 5V, 1A

Dépannage :

Merci de vous référer aux conseils suivants et possibles solutions si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du produit. Vous pouvez renvoyer le produit pour qu'il soit examiné et réparé par des techniciens agréés.

Problèmes	Causes possibles	Solutions
Le produit ne s'allume pas.	• Plus de batteries • Minuterie automatique	• Chargez l'appareil • Allumez l'appareil
Le produit ne se recharge pas	• Le câble USB n'est pas branché.	• Vérifiez la connexion du câble.
La pression de l'air devient faible.	• Batterie faible	• Rechargez l'appareil
L'indicateur lumineux diminue ou clignote		



SYNERFIT[®]

Copyright Synerfit[®]. All Rights Reserved.
SARL ILAN DIFFUSION
103 RUE DU MARECHAL LECLERC
94410 SAINT MAURICE FRANCE
www.synerfit.eu

Synerfit est une marque enregistrée par ILAN DIFFUSION SARL.
Produits importés par ILAN DIFFUSION SARL. Fabriqué en Chine.
Synerfit is registered by ILAN DIFFUSION SARL.
Imported by ILAN DIFFUSION SARL.
Made in China.



Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !